

## 简体中文

### 质量

Gaysafe 避孕套是天然乳胶制品，每个避孕套都通过电子防漏测试。Gaysafe 避孕套符合欧洲质量标准 EN ISO 4047:2002。

### 避孕套和避孕方法

GAYSAFE 避孕套，如果您正确使用，能够非常有效的防止怀孕。所以请认真阅读以下说明书

### 避孕套和艾滋病

GAYSAFE-避孕套，在正常使用条件下，可以帮助减小被传染艾滋病以及各种性器官传染疾病的可能。

### 避孕套及其可靠性

没有避孕套可以 100% 保证效用。也包括我们的高质量产品 Gaysafe 避孕套，**也有可能出现漏洞，一般来说是由于错误的使用方法造成的。**几乎所有的意外都是由于错误的使用方法造成的。所以如果您想最大限度的正确使用避孕套，请认真阅读我们的说明书，怎么使用避孕套？

### 如何适当的使用一个避孕套？

1. 只在使用前打开避孕套的包装。
2. 从中间部分撕开避孕套的铝箔包装。**不要使用任何锋利物品。**



3. 不要预先展开避孕套或给避孕套充气。
4. 在佩戴避孕套之前请将包皮掀起。
5. 用手指挤出精囊中的空气。
6. 在没带避孕套之前避免阴茎接触女方阴道，肛门，口。
7. 将避孕套放在勃起的阴茎上 并且慢慢卷开避孕套至阴茎根部。
8. 谨防任何锋利物品，指甲，或粗糙的皮肤，对避孕套造成伤害。
9. 如果避孕套不顺利展开，或经过错误的佩戴方式，请弃之！并使用一枚新的避孕套。
10. 射精后，在阴茎还勃起的情况下用手指抓住避孕套底端使之不能脱离阴茎，或使精液外流。同时慢慢将阴茎退出阴道。

### 永远记住以下条款：

1. **不能使用油性润滑剂**，例如凡士林，矿物油 植物油或奶油.这些物品将伤害避孕套。**在需要润滑的情况下，请使用水性润滑剂。**
2. 避孕套属一次性使用品
3. 常温保存避孕套，不要使之受热，避免接受直接阳光照射。
4. 如果你的伙伴正在使用涂于生殖器官上或周围的外用药物，则请遵医嘱，是否可以继续使用避孕套。
5. Gaysafe-避孕套是天然乳胶制品，如您有任何过敏史，或皮肤过敏者，请遵医嘱使用避孕套。如使用中产生问题，请立即联系医生。
6. 不要将用过的避孕套扔在抽水马桶中。

### 产品有效期

用以安全和质量保证，生产日期打印在每一个外包装上和每一个避孕套的铝箔上。

### 通告

如果您需要任何关于避孕套的信息,使用方法, 避孕方法 或者传染性性疾病的信息, 请联系您的医生, 当地计划生育组织, 医院 或性保健诊所。